

Instrucciones

Contenido del Kit:

- ✓ **4 dispositivos para la toma de la muestra**
- ✓ **Peticionario** de análisis
- ✓ **2 copias del Consentimiento Informado**, una copia para usted y otra para el laboratorio
- ✓ **Bolsa de mensajería** para el envío de la muestra

Tipo de muestra:

- ✓ **Macula Test** requiere cuatro **muestras de raspado bucal** para su realización. En la caja encontrará dos dispositivos que le permitirán la obtención de las muestras en su domicilio, enviándolas posteriormente al laboratorio para su análisis. Es crucial que tenga en cuenta las "Consideraciones previas" antes de proceder y que siga las "Instrucciones para la toma de muestra".



Consideraciones previas:

- ✓ No es preciso estar en ayunas.
- ✓ Durante los 60 minutos antes de obtener la muestra no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.

Instrucciones para la toma de muestra:

Dispositivos:



1



No ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni mastique chicle 60 minutos antes de obtener la muestra.

2



Saque un bastoncillo de la funda y colóquelo en la cara interna de la mejilla derecha y, sujetándolo firmemente, gire y frote el cepillo al menos 20 veces. Repita la operación con un segundo bastoncillo.

3



Saque un tercer bastoncillo de la funda y colóquelo en la cara interna de la mejilla izquierda y, sujetándolo firmemente, gire y frote el cepillo al menos 20 veces. Repita la operación con el cuarto bastoncillo.

4



Coloque cada bastoncillo de nuevo en su correspondiente funda y ciérrelo.

Anote en la etiqueta de cada dispositivo su nombre (NAME), fecha de nacimiento (DOB) y la fecha de la toma (DATE).

Pasos a seguir:



1. Recepción de la caja SYNLAB en su domicilio. Asegúrese de que la caja contiene todo el material listado en el primer apartado.



2. Tome las muestras teniendo en cuenta las “Consideraciones previas” y siguiendo los pasos indicados en el apartado “Instrucciones para la toma de muestra”.



3. Introduzca los **dispositivos** de nuevo en la caja SYNLAB. En el interior de la caja debe incluir también una de las dos copias del **Consentimiento Informado** y el **Peticionario** debidamente cumplimentados. Una vez esté todo dentro de la caja SYNLAB, introdúzcala en el sobre de mensajería.



4. Llame al número **93 470 34 84** para concertar la recogida de la muestra. Mencione que se trata de una muestra de SYNLAB e indique el código de abonado **29606** y la franquicia de envío **0843**. Debe enviar la caja SYNLAB en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.



5. Recibirá su resultado por **correo electrónico** en un plazo aproximado de **15 días**. Su informe se enviará **encriptado** con el fin de garantizar la protección de sus datos.