

Chequeo Completo Hombre

Instrucciones

Contenido del Kit:

- ✓ **Tarjetón de la prueba**, este documento es el justificante de la compra on-line, que deberá presentar para realizarse la prueba en el centro SYNLAB
- ✓ **Etiquetas con código de barras** para la identificación de la muestra
- ✓ **Peticionario** de análisis

Tipo de muestra:

- ✓ **Chequeo Completo Hombre** requiere una **muestra de sangre** y de **orina** para su realización, por lo que es necesario que acuda al centro SYNLAB con la documentación requerida para que le realicen la extracción y le faciliten un recipiente para recoger la muestra de orina. No olvide llevar las Etiquetas con código de barras para la correcta trazabilidad de la muestra. Tenga en cuenta las “Consideraciones previas” a la toma de la muestra.



Consideraciones previas:

- ✓ Es preciso ayuno de **12 horas**.
- ✓ No es necesario que la orina recogida sea la primera de la mañana.

Pasos a seguir:



1. Recepción de la caja SYNLAB en su domicilio. Asegúrese de que la caja contiene todo el material listado en el primer apartado.



2. Acuda a su centro con el **Tarjetón de la prueba**, las **Etiquetas con código de barras** y el **Peticionario** debidamente cumplimentado, allí le realizarán la extracción de sangre y le facilitarán un recipiente para recoger la orina.



3. Recibirá su resultado por **correo electrónico** en un plazo aproximado de **4 días**. Su informe se enviará **encriptado** con el fin de garantizar la protección de sus datos.