

Instrucciones

Contenido del Kit:

- ✓ **Tarjetón de la prueba**, este documento es el justificante de la compra on-line, que deberá presentar para realizarse la prueba en el centro SYNLAB
- ✓ **Etiquetas con código de barras** para la identificación de la muestra
- ✓ **Peticionario** de análisis
- ✓ **2 copias del Consentimiento Informado**, una copia para usted y otra para el laboratorio
- ✓ **Documento para identificación y custodia de muestras** (a cumplimentar en el laboratorio)

Tipo de muestra:

- ✓ **Huella Genética** requiere una **muestra de sangre** para su realización, por lo que es necesario que acuda al centro SYNLAB con la documentación requerida para que le realicen la extracción. No olvide llevar las **Etiquetas con código de barras** para la correcta trazabilidad de la muestra. Tenga en cuenta las “Consideraciones previas” a la toma de la muestra.



Consideraciones previas:

- ✓ No es preciso estar en ayunas.

Pasos a seguir:



1. Recepción de la caja SYNLAB en su domicilio. Asegúrese de que la caja contiene todo el material listado en el primer apartado.



2. Acuda a su centro con el **Tarjetón de la prueba**, una de las dos copias del **Consentimiento Informado**, las **Etiquetas con código de barras** y el **Peticionario** debidamente cumplimentados, allí le realizarán la extracción de sangre. El **Documento para identificación y custodia de muestras** no debe cumplimentarlo, debe presentarlo en el laboratorio donde le indicarán como proceder.



3. Es imprescindible que presente una **fotocopia del DNI**. En el caso de menores que no dispongan de DNI deberán entregar una fotocopia del libro de familia y una fotografía.



4. Recibirá su resultado por **correo electrónico** en un plazo aproximado de **23 días**. Su informe se enviará **encriptado** con el fin de garantizar la protección de sus datos.

